


vPad-IV は、各社あらゆるメーカーの輸液ポンプ、シリンジポンプの測定が可能な多機能チェッカです

高精度

誤差率が低い最高の測定精度

従来のメスシリンダ方式では、流量の平均値しか計測することができませんでしたが vPad-IVは流量を直接計測するため、瞬時流量を測定することができます。これにより、今までは平均値の中に埋もれていた瞬間的な短周期の流量変化や長周期の流量変化を定量的に確認することが可能となります。

また、スタートアップカーブやトランペットカーブによる解析が可能です。

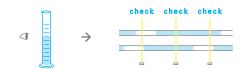


vPad-IVは誤差率±1%(0.1~3000ml/h)と非常に高い精度です

高機能

4種の基本テストモード

vPad-IVは、ポンプの流量・投与量などのシングルレートテスト、 デュアルレートテストやPCAポンプテスト、閉塞圧テストの4種の基本 テストモードがあります。

また、ボーラスボリュームやバックプレッシャー(背圧)も測定可能で、 保守点検を行うチェッカとして十分な機能が備わっています。

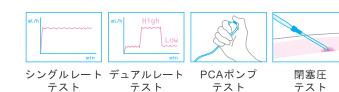


簡単オートテスト

煩雑なポンプ機能を自動で測定

vPad-IVは、煩わしいルートの差し替え作業を行わずに効率的にテストが行えます。さらに流量テスト終了後、自動的に閉塞圧テストを実行するオートテスト機能がある為、操作の手間を省くことができます。

また、タイマー制御機能 (テスト時間指定)により、業務の合間に テストを行うことができる為、テスト作業の効率化が図れます。

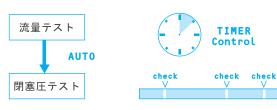


柔軟性

モジュール追加で最大6台まで同時検査可能

vPad-IVは、チャンネル拡張可能なモジュール式システムです。 1~6チャンネルのシステムへと自由に拡張構成できます。 同時に最大6台の輸液ポンプ、シリンジポンプの流量、投与量、閉塞圧 の測定が可能な為、複数台のポンプを効率的にテストすることが可能 となります。

スライドすることによりモジュールを追加し、チャンネルを拡張

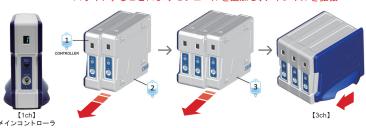

日本語の制御アプリにより、付属のタブレット上から操作が簡単に 行えます。自動合否判定で評価の時間を短縮でき、測定データや トレンドグラフなどもテストレポートとして記録、印刷、管理 することができます。

テストパターン管理

マニュアルテスト

自動合否判定

オートテスト

アイドリング機能

リアルタイム誤差率表示

6ch同時モニタリング

日本語対応

レポート自動作成

■ 流量テスト



試験日時: 2022年01月13日 16時35分009 vPad-IV S/N: IVM2021010001 (Ch1) 校正日: 2021年01月14日 機器情報 機器ID:SP-001 S/N:201203194 メーカー:METS 型式:METSSP022P 時時: シリンジポンプ 施設:メッツ病院 場所:病梗3F 検査者:メッツ太郎 作業時間:120分 次回テスト日:2022年02月15日 テスト: LTO 総合評価: OK 在量テスト 評価: OK 設定 100ml/h (-5~+5% 関圧 利定時間 アイドリング 0.1mmHg 1時間00分00秒 01分00秒 m/n (-5 ~ +5%) 100mix E 均液量 最大液量 暴小液量 3,1mi/h 117.8mi/h 85.59mi/h 0.1% +17.8% -14.4% ペットカーブ 100ml/h (-5 ~ +5%

インフュージョンポンプ点検レポート(1/2)

簡単自動 レポート作成

流量テスト、閉塞圧テストの 結果が明記されたレポート を自動で作成することができ ます。また、PDF形式での 保存が可能です。

トランペット カーブを表示

トランペットカーブを表示 することにより、ポンプの 特性が明瞭になります。



レポート印刷

作成したレポートは簡単に 印刷できる為、書類として 保管・管理することができ ます。

■ オートシーケンステスト



オートシーケンステストは、ユーザがテスト手順を自由に設定 でき、タブレット画面に表示させるテスト手順文章の編集も可能 です。オートシーケンステストの設定を行うことにより、どなた



でも簡単に手順に沿ったテストを行えます。

インフュージョンポンプチェッカ vPad-IV 仕様

■流量テスト

流量測定

通常測定範囲:Low…0.1~3000ml/h

最 大 流 量:3200ml/h 最 小 流 量: 0.01ml/h 解 能: 0.001ml/h 精度(平均流量)

: 0.1~9.9ml/hで±(1%+0.005ml/h) [100µl以上]

: 10~1200ml/hで±1%[1ml以上] : 1201~3000ml/hで±2%[10ml以上]

※定常流のみ

投与量測定

測 定 範 囲:0.02~9999ml 解 能:0.01ml 分

精 度

: 0.1~9.9ml/hで±(1%+1LSD) [100µl以上] : 10~1200ml/hで±(1%+1LSD) [1ml以上] : 1201~3000ml/hで±(2%+1LSD) [10ml以上]

経過時間測定

測 定 範 囲:0~240時間 表示様式: HH:MM:SS 精 度: ±0.5秒

■PCAポンプテスト

ボーラス測定

通 常 測 定 範 囲:0.02~9999ml 分解 能: 0.01ml 最小ボーラス検出量: 0.5ml

ロックアウト時間測定

測定範囲:1~240分 度:±0.05分 ※定常流のみ

■本体

寸法	重量
[1ch] 11.2cm (W) ×20cm (D) ×23.6cm (H)	1.34kg
[2ch] 16.3cm (W) ×20cm (D) ×23.6cm (H)	2.32kg
[3ch] 21.3cm (W) ×20cm (D) ×23.6cm (H)	3.30kg
[4ch] 26.4cm(W) ×20cm(D) ×23.6cm(H)	4.28kg
[5ch] 31.5cm(W) ×20cm(D) ×23.6cm(H)	5.26kg
[6ch] 36.6cm(W) ×20cm(D) ×23.6cm(H)	6.24kg

電源: 商用交流電源

同時測定可能なポンプ台数:1台(1ch)~6台(6ch)

※モジュールの増設にて最大6chに対応

■閉塞圧テスト

測 定 範 囲:-260~+2600mmHg(-5~+50psi)

精 度:±(1%+5mmHg)

表示 位:mmHg、psi、bar、mbar、kPa、in.H2O、 単

torr

気 圧 補 正:715~1095mbar

0 0 0 [5ch] [6ch] m 10 8 10 10

[3ch]

株式会社メッツはDatrend Systems社のアジアパシフィック公認サービスセンターです

輸入販売元



〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mets-tokyo.jp



代理店

