

針刺し防止機構付き止血弁内蔵透析用留置針
ハッピーキャス V

ハッピーキャス C-Pro

- フルカバータイプのセーフティ機能
- 多数回弁の採用により、
圧迫止血や鉗子を用いたクランプ操作が不要



メディキット株式会社

血液曝露防止 ◀◀ 2つの安


内針フルカバー型安全機能 | 針刺し防止&血液曝露防止



● コンパクトな内針フルカバー機構

- スムーズな操作感と感染対策を両立しました
- 針刺しと血液曝露を防ぐフルカバータイプのパッシブセーフティ機能
- カテーテルの挿入抵抗を低減しました

穿刺前

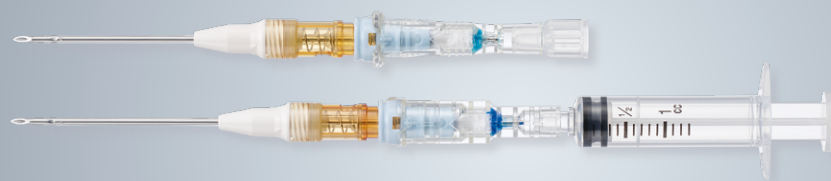

内針抜去後





1. 穿刺する

2. 送り込む

3. 内針を引き抜く

4. 内針フルカバー

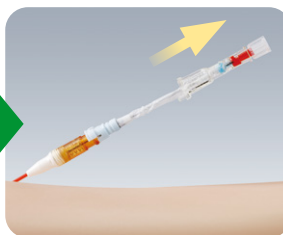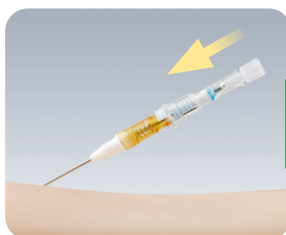


全機能▶▶ 針刺し防止

多数回型止血弁機能 | 血液曝露防止



● 止血弁をカテーテルハブに内蔵


- 多数回弁の採用により圧迫止血や鉗子を用いたクランプ操作が不要です。
- 透析中の一時離脱も可能です。

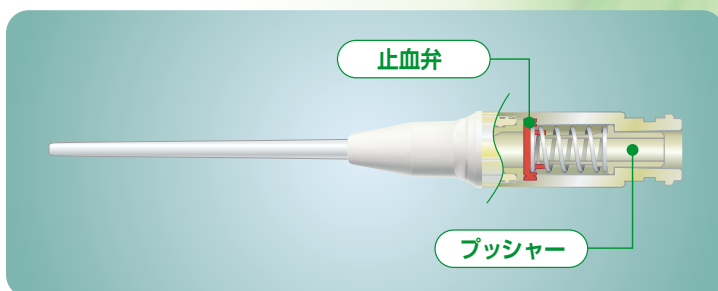

● 回路との接続

止血弁

内針抜去時

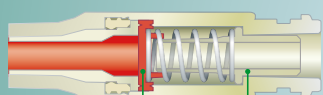


止血弁

プッシャー


内針を抜去すると止血弁が閉じて血液漏れを防ぎます。

回路との接続時

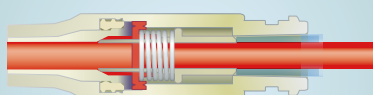

回路を接続するとプッシャーが止血弁を開放し流路が開通します。スクリューをしっかりとロックして下さい。


一時離脱時

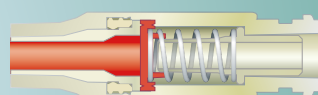

回路を外すと止血弁が再び閉じて自動的に止血します。(圧迫止血からの解放)

針刺し防止機構付き止血弁内蔵透析用留置針
ハッピーキャス V

ハッピーキャス C-Pro

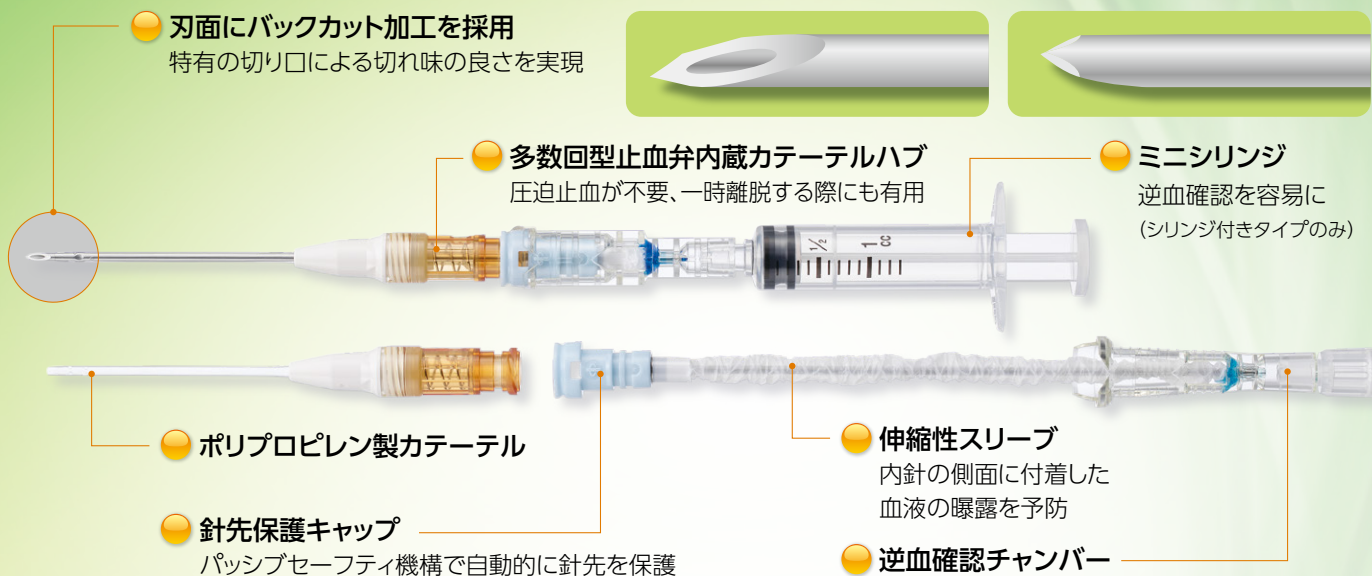

スタンダードタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2590	EB 14G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)	14/16G	ペールグリーン	33mm	○	電子線滅菌	4543527251921	ポリプロピレン
HP2592	EB 14G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○		4543527251945	
HP2387	EB 15G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro)			38mm	○		4543527237949	
HP2384	EB 15G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)	15/17G	ブルーグレー	33mm	○		4543527237130	
HP2390	EB 15G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○		4543527237970	
HP2388	EB 16G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro)			38mm	○		4543527237956	
HP2385	EB 16G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)	16/18G	ホワイト	33mm	○		4543527237147	
HP2391	EB 16G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○		4543927237987	
HP2398	EB 16G VC×1.1/4"PP(C-Pro)			33mm	×		4543527238052	
HP2389	EB 17G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro)	17/19G	レッドバイオレット	38mm	○		4543527237963	
HP2386	EB 17G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)			33mm	○		4543527237154	
HP2392	EB 17G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○		4543527237994	

翼付きタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2333	EB 15G 4HWVC×1.1/4"PP(C-Pro)	15/17G	ブルーグレー	33mm	○	電子線滅菌	4543527228824	ポリプロピレン
HP2334	EB 16G 4HWVC×1.1/4"PP(C-Pro)	16/18G	ホワイト	33mm	○		4543527228831	
HP2335	EB 17G 4HWVC×1.1/4"PP(C-Pro)	17/19G	レッドバイオレット	33mm	○		4543527228848	

ミニシリンジタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2393	EB 15G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro S)	15/17G	ブルーグレー	38mm	○	電子線滅菌	4543527238007	ポリプロピレン
HP2394	EB 16G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro S)	16/18G	ホワイト	38mm	○		4543527238014	
HP2395	EB 17G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro S)	17/19G	レッドバイオレット	38mm	○		4543527238021	

シリンジ付きLSタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2593	EB 15G 4HVC×1.1/2"PP(C-ProLS)	15/17G	ブルーグレー	38mm	○	電子線滅菌	4543527246774	ポリプロピレン
HP2594	EB 16G 4HVC×1.1/2"PP(C-ProLS)	16/18G	ホワイト	38mm	○		4543527246781	
HP2595	EB 17G 4HVC×1.1/2"PP(C-ProLS)	17/19G	レッドバイオレット	38mm	○		4543527246798	

医療機器認証番号：21400BZZ00343000

販売名：ハッピーキャス V

入数：50本/箱

ご使用前に製品の添付文書を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

発 売 元：メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201

製造販売元：東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000

営 業 所：東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎

流通倉庫：宮崎県日向市・千葉県佐倉市

<http://www.medikit.co.jp/>

<http://www.togomedikit.co.jp/>